

# Das PureFlo™ ESM+ Atemschutzgerät aufsetzen und abnehmen

## 1 1. AUFLADEN UND EINSETZEN DES AKKUS

Bringen Sie einen Steckereinsatz am Akkuladegerät an.



Laden Sie den Akku auf (die Ladedauer beträgt 2,5 Stunden).

Setzen Sie den vollständig geladenen Akku in das Atemschutzgerät ein.



ZUSTAND	LED STATUS
Vor dem Ladevorgang	GELB 
Schnellladen	ORANGE 
Akku vollständig geladen	LEUCHTET GRÜN 

## 2 VISUELLE PRÜFUNG

- Überprüfen Sie den Halsriemen und das Gesichtsabdichtungsmaterial auf Beschädigungen.



Stellen Sie sicher, dass der Halsriemen am Gehäuse des Atemschutzgeräts befestigt ist und überprüfen Sie die Visierdichtung auf Beschädigungen.



Überprüfen Sie die Funktion des Hals-Spannverschlusses.



Überprüfen Sie den Atemfilter auf Verunreinigungen.



## 3 AUFSETZEN DES ATEMSCHUTZGERÄTS

Stellen Sie sicher, dass das verstellbare Kopfband auf Kopfumfang und -höhe eingestellt ist.




Setzen Sie das Kopfband in die vordere oder hintere Position und lassen Sie es einschnappen.



Schalten Sie das Atemschutzgerät ein. Die rote und grüne LED leuchten auf. Sobald sich die rote LED ausschaltet, ist das Atemschutzgerät zum Aufsetzen bereit.

Setzen Sie das Atemschutzgerät auf den Kopf auf und passen Sie die Dichtung an, indem Sie den Kordelzug des Hals-Verschlusses in Position ziehen.

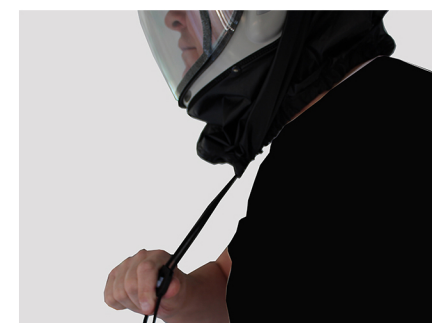

Stecken Sie die Kordel des Kordelzugs in Ihre Arbeitskleidung.

Wenn das grüne Licht während des Betriebs in Abständen blinkt und ein hörbares Signal abgegeben wird, ist das ein Zeichen für einen niedrigen Akkuladestand.

Bei einem Leuchten des roten Lichts zusammen mit einem akustischen Alarm muss der Filter ersetzt werden. Stellen Sie sicher, den kontaminierten Bereich zu verlassen.

## 4 ABNEHMEN DES ATEMSCHUTZGERÄTS

Stellen Sie sicher, dass Sie sich nicht in einem kontaminierten Bereich befinden.

Lösen Sie den Hals-Spannverschluss, heben Sie das Atemschutzgerät vorsichtig vom Kopf und schalten Sie es aus.

Schließen Sie den Hals-Kordelzug vollständig und legen Sie ihn in das Atemschutzgerät, um den Innenbereich des Atemschutzgeräts sauber und staubfrei zu halten, wenn dieses nicht in Betrieb ist.



Ein Polyethylen-Beutel zur sauberen Aufbewahrung ist Teil des Lieferumfangs.

### FILTERWECHSEL

- Halten Sie das Atemschutzgerät so, dass der Filter nach unten zeigt.
- Halten Sie das Atemschutzgerät fest, drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und entsorgen Sie den Filter.
- Setzen Sie einen neuen Filter ein und schrauben Sie ihn im Uhrzeigersinn handfest am Gerät fest.